

mobilomed msept Minosept Pro

Flächendesinfektion

- Phenol-, aldehyde- und phosphatfrei
- Breites Wirkungsspektrum
- Begrenzt viruzid

Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung



ANWENDUNGSBEREICHE

Gem. Biozidprodukte-Verordnung: Minosept Pro ist ein flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung wasserresistenter Oberflächen aller Art, auch für lebensmittelverarbeitende Bereiche und Großküchen.

Minosept Pro kombiniert sowohl Reinigung als auch Desinfektion und ist damit ein universelles Reinigungsdesinfektionsmittel für alle Oberflächen in medizinischen Bereichen.

Die alkoholfreie Rezeptur eignet sich sehr gut für patientennahe Oberflächen und medizinisches Inventar mit alkoholempfindlichen Oberflächen. Aufgrund speziell ausgewählter Wirkstoffe und Tenside verbindet es gute Materialverträglichkeit mit guten Reinigungseigenschaften. Norovirenwirksam.

ANWENDUNG

Die zu desinfizierende Fläche mit einer ausreichenden Menge der frisch angesetzten Gebrauchslösung vollständig benetzen, diese mechanisch verteilen und abtrocknen lassen (Scheuer-Wisch-Desinfektion). In der Routineanwendung können die desinfizierten Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung wieder genutzt werden. Die empfohlene Einwirkzeit ist 15 Minuten. Ein Nachwischen ist nicht erforderlich. Nicht geeignet für die Anwendung auf Polycarbonaten.

Desinfektion im Lebensmittelbereich: Im Lebensmittelbereich nach der Einwirkzeit mit ausreichend Trinkwasser gründlich nachspülen.

Die angesetzte Gebrauchslösung kann bis zu 28 Tage in luftdichten Behältern aufbewahrt werden. **Achtung** - Minosept Pro nicht in Verbindung mit Produkten auf Aldehydbasis benutzen. Die Anwendung wird auf folgenden Materialien nicht empfohlen: Kupfer, Messing, Polyethylene terephthalate (PET), Polycarbonate (PC), Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS).

Dosierung

0,5% Lösung: 5ml Minosept Pro + 995ml Wasser

0,25% Lösung: 2,5ml Minosept Pro + 997,5 ml Wasser

EINWIRKZEITEN UND KONZENTRATIONEN

	Zeit	Konzentration
Bakterizid (inkl. MRSA, VRE) gem. EN13727, EN14561, EN13697	15 min	0,25%
levurozid gem. EN13624	15 min	0,25%
Mykobakterizid gem. EN 14348	15 min	0,5%
wirksam gegen alle behüllten Viren (z. B. HIV, HBV, HCV) gem. EN14476	5 min 15 min	0,5% 0,25%
Rotaviren gem. EN14476	5 min 15 min	0,5% 0,25%

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten: Didecyl-Dimethyl-Ammonium Chloride (DDAC) 12,5g ;
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 12,5g

BAuA- Nr: N-100112

UFI Code: 174X-RK30-W00R-7XRN

LIEFERFORMEN

Artikelnummer	Inhalt	Flasche	VPE
285696	1 Liter	Dosierflasche	10 x 1L
285697	5 Liter	Kanister	3 x 5L

BESONDERE HINWEISE

Das Produkt ist vollumfänglich begutachtet und in Deutschland als Biozid registriert.

KENNZEICHNUNG GEMÄß GEFÄHRSTOFFVERORDNUNG

GEFÄHR

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition (Oral). Kann die Atemwege reizen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter zugelasenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Das Produkt nicht unter 5 Grad und über 30 Grad lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Alle Behältnisse und Verschlüsse bestehen aus Polyethylen (HDPE).

Die Behältnisse und Verschlüsse sind entsprechend gekennzeichnet, um eine sortenreine Trennung und eine optimale Wiederverwertbarkeit zu ermöglichen. Vollständig restentleerte Verpackungen können dem Recycling (Sammelstelle) zugeführt werden.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.**

HERSTELLER

mobiloclean Handelsgruppe GmbH & Co.KG
Lilienthalallee 5
80807 München

Stand der Information 05/2021