

# mobilomed msept Wipes

## Vliestuchspendersystem



- zur Tränkung mit allen Flächendesinfektionsmitteln
- wiederbefüllbares Spendersystem
- gute Abgabe des Wirkstoffes auf die Fläche
- sehr wirtschaftlich

### Vliestuchspendersystem zur Tränkung mit Desinfektionsmittel

#### ANWENDUNGSBEREICHE

**mobilomed Wipes** sind trockene Vliestücher zur Tränkung mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln und Anwenderlösungen von Desinfektionsmittelkonzentraten. Ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Desinfektion und Reinigung von Flächen und Medizinprodukten. Die Tücher bestehen aus hochwertigem, fusselfreiem Vliesstoff. **mobilomed Wipes** wurden speziell für die Flächendesinfektion entwickelt. Sie geben die Desinfektionslösung hervorragend ab und gewährleisten eine einwandfreie Benetzung der zu desinfizierenden Fläche. **mobilomed Wipes** können aus einem eigens dafür konzipierten **mobilomed Wipes** Vliestuchspender entnommen werden. Die Anwendungslösung wird durch das geschlossene System vor externer Kontamination und Verdunstung geschützt. Dadurch ist die Anwendungslösung 28 Tage verwendbar. Der Vliestuchspender besteht aus Polyethylen und Polypropylen und ist bis 60°C spülmaschinenfest. Ein spezielles Etikett, welches die Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfalldatum erleichtert, ist jeder **mobilomed Wipes** Rolle beigefügt.

#### ANWENDUNG

Gebrauchsfertige Anwendungslösung des gewünschten Desinfektionsmittels herstellen (Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeit den Herstellerangaben entnehmen). Anschließend erfolgt die Tränkung der Tücher im Spendereimer mit 2,25 Litern der Gebrauchslösung des Desinfektionsmittelkonzentrats oder des gebrauchsfertigen alkoholischen Desinfektionsmittels. Es dauert 30 Minuten bis alle Tücher vollständig getränkt sind.

Bitte fordern Sie separat den Infolyer zur richtigen Aufbereitung des Spendereimers an.

#### ZUSAMMENSETZUNG

1 Rolle besteht aus 90 Wischtüchern à 32 cm x 30 cm, trocken, aus hochwertigem, fusselfreiem Vlies. 100% Kunstfaser.

#### GUTACHTEN

Prof. Dr. Werner, Hygieniker, Schwerin  
 Gutachten zur Wirksamkeit/Standzeit gem. 4-Felder Test  
 In Verbindung mit  
 - Quicksept Pur  
 - Minosept

#### LIEFERFORMEN

Größe	Arkelnumm
Eimer ohne Befüllung	160650
Mobilomed Wipes Rolle à 90 Tücher	160651